


## Oxy<sub>2</sub>Mask™ EtCO<sub>2</sub> Entidale CO<sub>2</sub>-Messung inklusive

Oxy<sub>2</sub>Mask™ EtCO<sub>2</sub> sorgt für ein besseres Oxygenierungs- und Beatmungsmanagement:

- Flexible Sauerstofftitrierung von 1 bis 15+ lpm
- Zuverlässige nasale und orale EtCO<sub>2</sub>-Messung
- Ideal für endoskopische Untersuchungen

### Flexible Sauerstofftitration von 1 bis 15+ lpm


Wie Oxy<sub>2</sub>Mask™ ist auch Oxy<sub>2</sub>Mask™ EtCO<sub>2</sub> ein hocheffizientes „offenes“ Maskensystem mit verbesserter Diffusor-Technologie. Es liefert Sauerstoffflüsse von 1 bis 15+ lpm, 24 bis 83 % FiO<sub>2</sub> bei gleichzeitiger Überwachung des ausgeatmeten CO<sub>2</sub>.

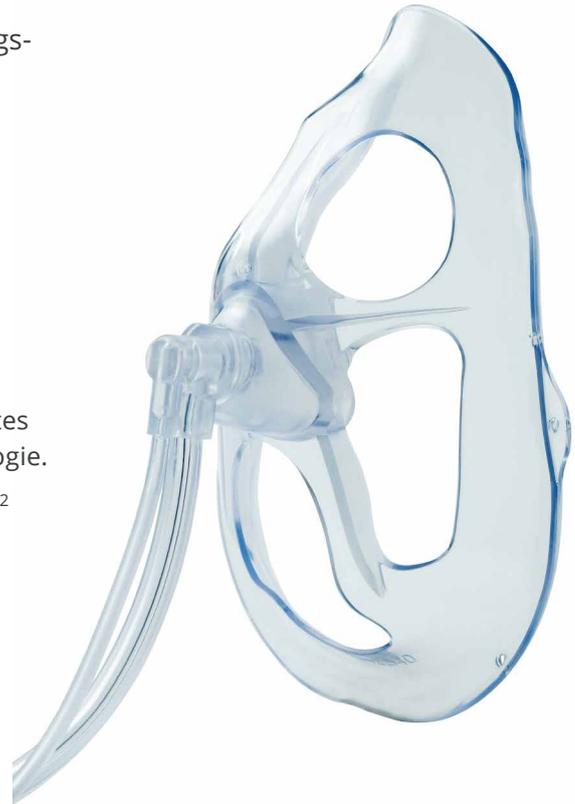


### Zuverlässige nasale und orale EtCO<sub>2</sub>-Messung

Das neue Design erhöht nicht nur den verfügbaren FiO<sub>2</sub>. Durch den nach außen gerichteten Trichter des Diffusors unterstützt es auch die stabile EtCO<sub>2</sub>-Wellenform, um zuverlässige EtCO<sub>2</sub>-Messwerte zu erhalten.


Insbesondere bei höheren O<sub>2</sub>-Flüssen bietet die neue Oxy<sub>2</sub>Mask™ EtCO<sub>2</sub> eine bis zu 107 % verbesserte EtCO<sub>2</sub>-Erfassung bei 15 lpm O<sub>2</sub>.

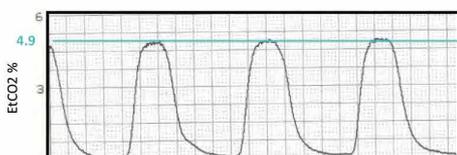

Sauerstofffluss 4 lpm

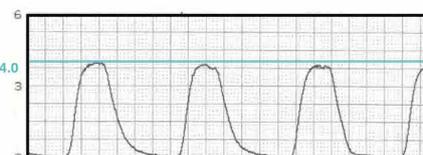


Sauerstofffluss 10 lpm

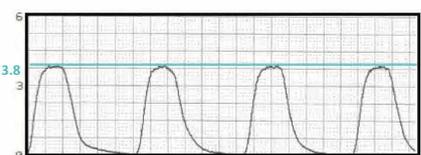



Sauerstofffluss 15 lpm

## Oxy<sub>2</sub>Mask™ EtCO<sub>2</sub> vs. herkömmliche Produkte

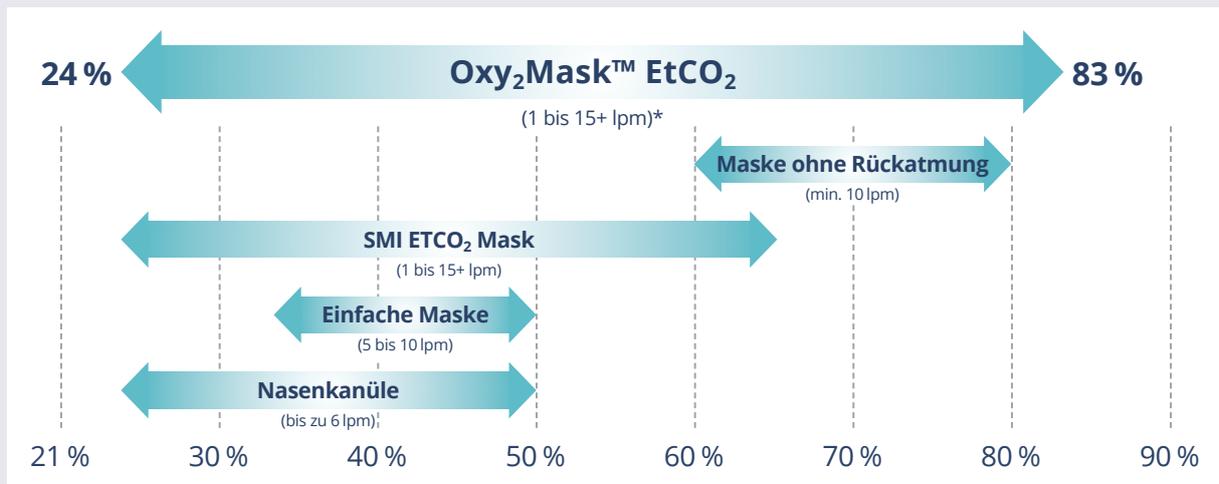

AARC Clinical Practice Guideline aus: RESPIRATORY CARE (Respir Care 2002; 47(6):717-720)

\* F1H2312-01 report

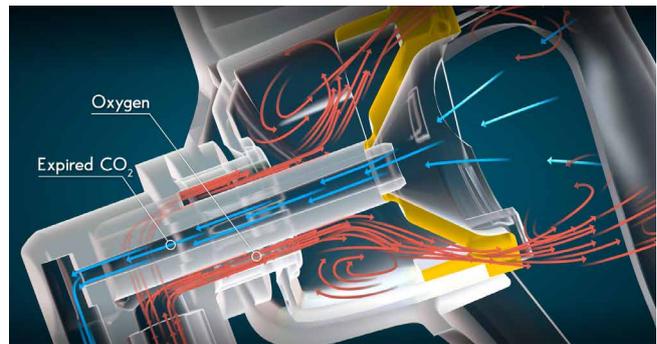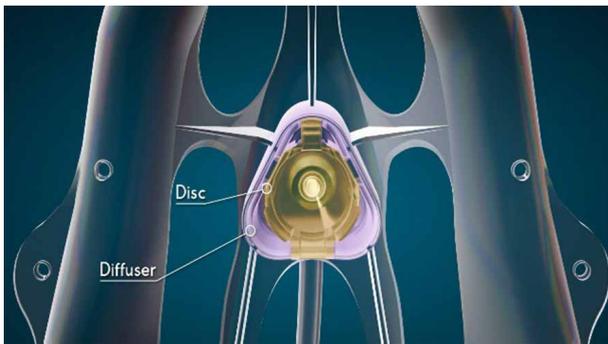

Innenansicht des aktualisierten Diffusor- und Prallplatten-Designs mit Richtungselementen an den Diffusorscheitelpunkten (pink); es zeigt den Fluss konzentrierter Sauerstoffwirbel, die aus den aerodynamischen Richtungselementen absichtlich in Richtung Nase und Mund strömen, und EtCO<sub>2</sub>, das in den pilzförmigen Becher und die Probenleitung hinunter fließt, selbst bei höheren Sauerstoffflüssen.

### OXY<sub>2</sub>MASK™ ETCO<sub>2</sub> GIBT ES IN DREI GRÖSSEN:

- Oxy<sub>2</sub>Mask™ EtCO<sub>2</sub> Adult
- Oxy<sub>2</sub>Mask™ EtCO<sub>2</sub> Plus
- Oxy<sub>2</sub>Mask™ EtCO<sub>2</sub> Kid

#### BESTELLINFORMATIONEN

ARTIKEL	VPE	ART. NR.
Oxy <sub>2</sub> Mask™ EtCO <sub>2</sub> Adult	25 Stk.	SM-OM-2125-8
Oxy <sub>2</sub> Mask™ EtCO <sub>2</sub> Plus	25 Stk.	SM-OP-2125-8
Oxy <sub>2</sub> Mask™ EtCO <sub>2</sub> Kid	25 Stk.	SM-OK-2125-8