

OxyMulti-Mask™

Oxygenierung und Aerosoltherapie

OxyMulti-Mask™ sorgt für ein besseres Oxygenierungs- und Beatmungsmanagement. Ohne die O₂-Abgabe zu beeinträchtigen ermöglicht diese offene Maske auch eine wirksame Aerosoltherapie:

- Flexible Sauerstofftitrierung von 1 bis 15+ Liter pro Minute – Flush
- Liefert 23 % bis 83 % FiO₂
- Mit oder ohne Aerosolvernebler verwendbar
- Einfache Verabreichung von aerosolisierten Medikamenten bei gleichzeitiger O₂-Abgabe
- Ideal für Akutversorgungs- und EMS-Situationen

Einzigartige Flow-Technologie


OxyMulti-Mask™ verfügt über eine innovative Diffuser-Technologie zur gezielten Steuerung der Sauerstoffzufuhr. Durch das leichte und offene Design ist OxyMulti-Mask™ ein hocheffizientes, offenes Maskensystem, das ohne geschlossenes Design, Ventile und Reservoirs auskommt. Eine OxyMulti-Mask™ Sauerstoffmaske ersetzt mehrere konventionelle Produkte für die Sauerstofftherapie und spart dadurch Zeit, Geld und verringert den Müll.

Hoher Sauerstoffgehalt. Effiziente Aerosoltherapie.

In der Ausführung für Erwachsene liefert OxyMulti-Mask™ Sauerstoffflüsse von 1 bis 15+ lpm, 23 bis 83 % FiO₂. Mit ihrem breiten FiO₂-Bereich ersetzt die offene Technologie der OxyMulti-Mask™ herkömmliche Sauerstoffschnittstellen für die Verabreichung von Sauerstoff- und Aerosoltherapie. Die Sauerstoffzufuhr erfolgt über einen konventionellen Schlauch oder mit Hilfe eines Adapters mit 22 mm Außendurchmesser, der in ein drehbares Anschlussstück gesteckt wird. Das Anschlussstück passt für die meisten Aerosol-Vernebler und garantiert eine wirksame Aerosoltherapie, ohne die Sauerstoffzufuhr zu beeinträchtigen. Optional mit oder ohne Befeuchtungs- bzw. Aerosoltherapie verwendbar.



OxyMulti-Mask™ vs. herkömmliche Produkte

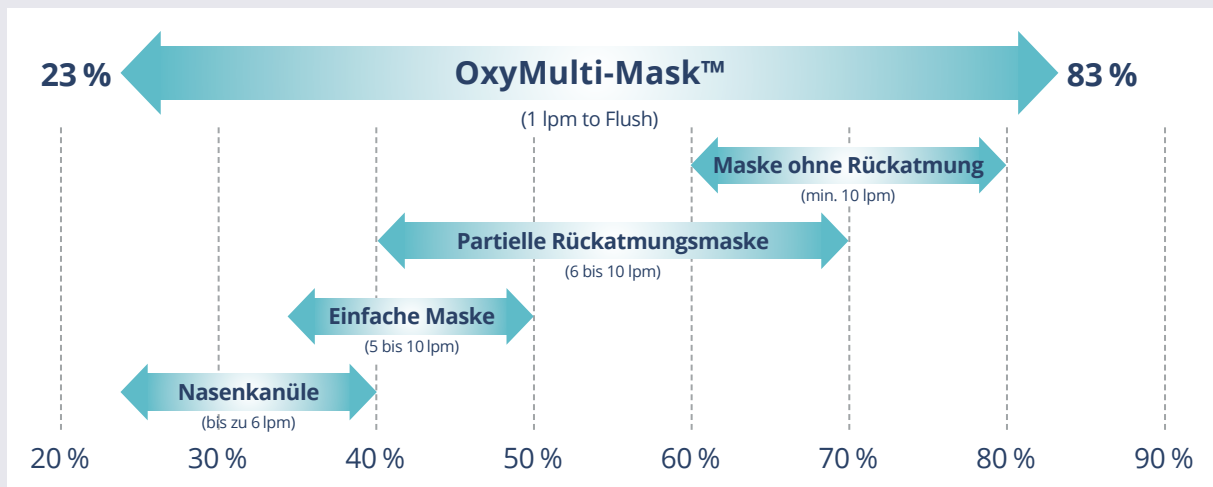

Mehr Möglichkeiten. Mehr Komfort.

- Verringert das Risiko einer CO₂-Rückatmung
- Reduziert die Gefahr der Aspiration von Erbrochenem
- Einfache Verabreichung von aerosolisierten Medikamenten
- Ermöglicht Mundpflege, Absaugen sowie das Legen einer nasogastrischen Sonde bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Sauerstofftherapie
- Kein Wärme- oder Feuchtigkeitsstau unter der Maske
- Reduziert das Gefühl der Klaustrophobie
- Ermöglicht uneingeschränkte Kommunikation sowie das orale Verabreichen von Flüssigkeiten
- Kompatibel für die Verwendung mit einer Vielzahl von Aerosolgeräten

OXYMULTI-MASK™ GIBT ES IN DREI GRÖSSEN:

- **OxyMulti-Mask™ Adult**
passt 80 % der erwachsenen Patienten
- **OxyMulti-Mask™ Plus**
25 % größer – für Patienten mit einem größeren Gesicht oder einem Bart. Kann auch bei Patienten verwendet werden, deren Mund beim Atmen weit geöffnet bleibt.
- **OxyMulti-Mask™ Kid**
für Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren oder im Gewichtsbereich von 15 bis 32 kg. Mit 3D-Pinguin-Design. Liefert 22 bis 93 % Sauerstoff.

BESTELLINFORMATIONEN

ARTIKEL	VPE	ART. NR.
OxyMulti-Mask™ Adult	25 Stk	SM-OHH 1025-8
OxyMulti-Mask™ Plus	25 Stk	SM-OPHH 1025-8
OxyMulti-Mask™ Kid	25 Stk	SM-OKHH 1025-8